

Návod na použitie Alligat Chroma Fast Set

1. Miešací pomer je 1/2 odmerky pitnej vody (20 °C ± 2 °C /68 °F) pre každú zarovnanú odmerku Alligat(10 g Alligat/23 ml vody).

a. Čas spracovania je ovplyvnený teplotou vody, studenejšia voda spomaľuje tuhnutie, teplejšia voda ho urýchľuje.

2. Miešajte intenzívne po dobu 30 s. Na začiatku miešania sa môžu objaviť v hmote hrudky. Roztierajte hmotu rýchlo proti stene miešacieho téglíka a hrudky zmiznú.

3. Naplňte lyžicu odtlačkovou hmotou počas 60 s a zhotovte odtlačok. Odtlačok po stuhnutí zmení farbu z ružovej na bielu.

4. Po opláchnutí od slín/krví odstráňte prebytočnú vodu.

5. Aby ste sa vyhli objemovým zmenám, mal by byť odtlačok odliaty do 15 min po vybratí odtlačku z úst.

Nádobu s práškom dobre uzavrite a skladujte v chladnom (max 25°C) a suchom mieste.

pracovný čas: 1,5 min

čas v ústach: 1,5 – 2 min

celkový manipulačný čas: 3 minúty

Farba: ružová

Trvanlivosť: 2 roky

Obsah: 453g

Obrázkový návod (piktogram) je na každom vrecku.

