

SeptoAccessories

From now. Everyday. Septodont Accessories.



Obsah:

NÁSTROJE

Septo Contact	4
Septo Compo Shape	6
Septo Cure	8

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Septo Discs	10
Septo Wheels PX	12
Septo Polisher	14
Septo Fipo Strip	16
Septo Diamond Strip	18
Septo Diamond Paste	20

MATRICE

Septo Matrix Cervical	22
Septo Matrix Sectional	24

KLÍNKY

Septo Wedges	26
---------------------------	----

IZOLACE

Septo Tape	28
-------------------------	----

PROFYLAXE

Septo Prophy Strip	30
---------------------------------	----

NÁSTROJE

SeptoContact

NÁSTROJ PRO REKONSTRUKCI BODU KONTAKTU

INDIKACE

Nástroje určují funkční vlastnosti dentálních materiálů do značné míry. Dobře zvolené instrumentarium má značný vliv na efektivitu a ergonomii práce zubního lékaře. SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro snadnou a především opakovatelnou rekonstrukci bodů kontaktu z kompozitů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Zaručené dosažení perfektního bodu kontaktu za použití opakovaného postupu „tří kroků“.

- Jeden nástroj pro velké kavity (L) a jeden pro malé kavity (S).
- Každý nástroj má distální a meziální hrot.
- Nástroje jsou světlovodivé, umožňují polymerizaci.
- Jsou vhodné pro sterilizaci.



BALENÍ

POPIS

SeptoContact: 2 nástroje, každý s distálním a meziálním hrotem

SeptoContact
nástroje



NÁSTROJE

SeptoCompo Shape


SILIKONOVÉ KONCOVKY PRO MODELOVÁNÍ KOMPOZITU

INDIKACE

Silikonové koncovky SeptoCompo Shape jsou skvělým pomocníkem pro pohodlné modelování přímých i nepřímých výplní. Snadná manipulace, kontrola adaptace nanášených vrstev a schopnost řídit „lepivost“ jednotlivých kompozitů jsou nesporné výhody tohoto nástroje. Každý pohyb s tímto nástrojem snadno modeluje kompozit v ideální, anatomický tvar výplně.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Umožňují vyhnout se efektu linií mezi vrstvami kompozitu, které mohou vzniknout při aplikacivrstvené techniky.
- Poskytují hladký povrch, který výrazně zkracuje dobu konečného dokončování a leštění.
- K dispozici ve dvou verzích s tvrdými a měkkými koncovkami pro optimální výsledky v závislosti na tvrdosti používaného kompozitu.
- Koncovky jsou k dispozici ve čtyřech tvarech, které umožňují jejich výběr pro různé klinické případy.
- SeptoCompo Shape je vhodný pro sterilizaci, stejně tak i koncovky.

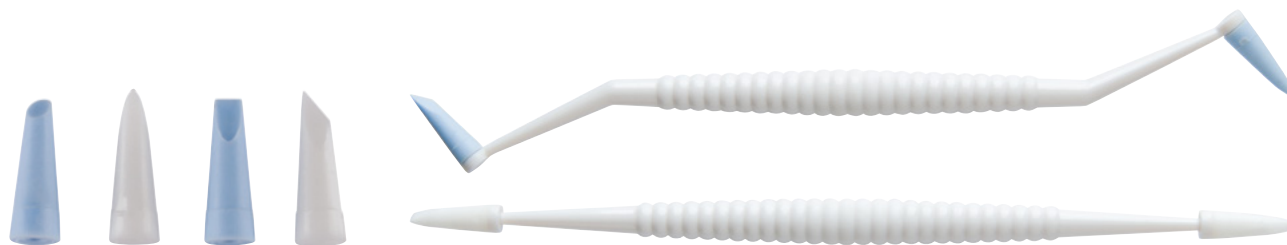

BALENÍ

POPIS

SeptoCompo Shape: 2 nástroje + 8 ks silikonových koncovek (měkké/tvrdé)

SeptoCompo Shape Refill: 4 ks měkké silikonové koncovky

SeptoCompo Shape Refill: 4 ks tvrdé silikonové koncovky

SeptoCompo Shape
nástroje



NÁSTROJE

SeptoCure


NÁSTROJ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU OKRAJOVÉ NETĚSNOSTI VYPLNÍ V GINGIVÁLNÍ OBLASTI

INDIKACE

SeptoCure je nástroj speciálně navržený pro zlepšení okrajové adaptace a zvýšení účinnosti polymerizace dentálních kompozitů v oblastech s obtížným přímým přístupem. Netěsnosti výplní II. třídy v oblasti kontaktních stěn s dásní budou podstatně nižší, pokud lékař použije nástroj, který ideálně vede světlo polymerační lampy a zlepší tak adaptaci kompozitu. Díky nástroji SeptoCure bude kompozit i adhezivní systém vhodně polymerován, což znamená nejen okrajovou integritu, ale také požadované mechanické vlastnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Navržen tak, aby zabránil a minimalizoval marginální prosakování kompozitních materiálů z výplní II. třídy.
- Kompozita se na nástroj nepřilepí během polymerace.
- Světlovedivý nástroj umožňuje efektivnější polymeraci kompozita díky světlu vedenému přes hrot nástroje.
- Uspadňuje dosažení správné adaptace kompozita na dno kavity.
- Nástroje jsou vhodné pro sterilizaci.

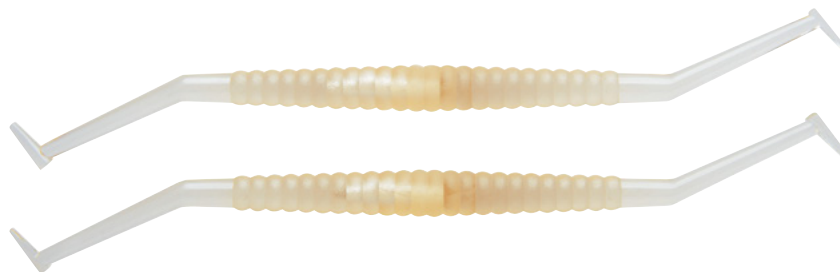

BALENÍ

POPIS

SeptoCure: 2 nástroje, 4 ks rozdílných hrotů

SeptoCure
nástroje



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoDiscs

DOKONČOVACÍ A LEŠTÍCÍ DISKY PRO KOMPOZITA

INDIKACE

Více flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny proximální a vestibulární plochy.

Tenší: jednodušší konturování a dokončování proximálních povrchů, dokonce i v oblastech s obtížným přístupem.

Vysoká účinnost finálního opracování: minimální drsnost povrchu, vysoký lesk.

Vysoce abrazivní: dosáhnete lepšího opracování za kratší čas, snadné odstranění všech excesů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Praktické, dlouhá životnost a snadné použití.
- Systém Pop-On mandrelu umožňuje rychlé a snadné uchycení a přetáčení disků.
- Extra-jemné disky jsou velmi ohebné a všestranné.
- Jsou vhodné zejména pro obtížně přístupné oblasti.
- Čtyři hrubosti, snadné rozpoznání díky barevnému kódování. Dostupné ve velikostech 1/2" a 3/8".



BALENÍ

POPIS

SeptoDiscs Kit: 120 disků + SeptoDiscs Mandrel
(\varnothing 1/2": 20x Hrubý, 20x Střední, 20x Jemný,

20x Extra-jemný, \varnothing 3/8": 10x Hrubý, 10x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)

SeptoDiscs Assorted Refill \varnothing 1/2": 50 disků (15x Hrubý, 15x Střední, 10x Jemný, 10x Extra-jemný)

SeptoDiscs Hrubý Refill \varnothing 1/2": 50 disků

SeptoDiscs Střední Refill \varnothing 1/2": 50 disků

POPIS

SeptoDiscs Jemný Refill \varnothing 1/2": 50 disků

SeptoDiscs Extra-jemný Refill \varnothing 1/2": 50 disků

SeptoDiscs Mandrel: 1 ks

SeptoDiscs Assorted Refill \varnothing 3/8": 50 disků

SeptoDiscs Hrubý Refill \varnothing 3/8": 50 disků

SeptoDiscs Střední Refill \varnothing 3/8": 50 disků

SeptoDiscs Jemný Refill \varnothing 3/8": 50 disků

SeptoDiscs Extra-jemný Refill \varnothing 3/8": 50 disků

SeptoDiscs

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoWheels PX

IMPREGNOVANÉ PLSTĚNÉ DISKY

INDIKACE

Zhotovení dokonalé výplně vyžaduje zručnost, perfektní materiály a spolehlivé nástroje. K dosažení jedinečného výsledného efektu leštění jsou nepostradatelným pomocníkem plstěné disky SeptoWheels PX!

Světlo, které se odráží a láme na povrchu výplně dodává požadovaný efekt přirozeného vzhledu rekonstrukci. SeptaWheels PX jsou vyrobeny z přírodní vlny impregnované abrazivní lešticí pastou. Aktivujete je pomocí několika kapek vody.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoce efektivní při konečném leštění, tj. dosažení přirozeně lesklého povrchu.
- Garance krásných, bílých a lesklých zubů po bělení.
- Impregnováno ultra-jemnou dehydratovanou lešticí pastou, aktivovanou pouze několika kapkami vody.
- K dispozici ve velikosti 9,5 mm.



BALENÍ

POPIS

SeptoWheels PX*: 12 impregnovaných plstěných disků + SeptoPlus Mandrel

SeptoPlus Mandrel: 1ks

*SeptoPlus Mandrel je vyžadován

SeptoWheels PX

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoPolisher

SILIKONOVÉ GUMIČKY PRO KOMPOZITA, SKLOIONOMERY A AMALGÁMY

INDIKACE

SeptoPolisher nabízí zkrácený algoritmus klinického protokolu práce se silikonovými leštícími gumičkami. V závislosti na použité síle je možné získat konečný efekt opracování a leštění pouze jedním nástrojem. Použití větší síly zesiluje účinnost opracování. Pro dosažení požadované kvality leštění, použijte méně síly, dosáhnete tak hladkého, rovnoměrného a zářivého povrchu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Jedna silikonová gumička pro dosažení požadovaného výsledného opracování a vyleštění výplně. Šetří čas i materiál během zákroku.
- Gumičky mají dlouhou životnost, je možné jejich několikanásobné opakované použití, jsou vhodné pro sterilizaci.
- K dispozici ve třech tvarech: kužel, disk a kalíšek.



BALENÍ

POPIS

SeptoPolisher* Assorted Refill: 8 ks + SeptoPlus Mandrel (3 ks kužel, 3 ks disk, 2 ks kalíšek)

SeptoPolisher* Refill: 8 ks kužel + SeptoPlus Mandrel

SeptoPolisher* Refill: 8 ks disk + SeptoPlus Mandrel

SeptoPolisher* Refill: 8 ks kalíšek + SeptoPlus Mandrel

SeptoPlus Mandrel: 1 ks

* SeptoPlus Mandrel je vyžadován

SeptoPolisher

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoFipo Strip

POLYESTEROVÉ PÁSKY, POTAŽENÉ OXIDEM HLINITÝM

INDIKACE

Pásky SeptoFipo Strips jsou indikovány pro dokončování a leštění aproximálních plošek kompozitních výplní.

Pro zavedení do aproximálního prostoru použijte neutrální středovou část pásku. Začněte výplň dokončovat stranou pásku se střední hrubostí (šedá) a pak ji vyleštěte jemnou stranou (bílá barva).

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Střední a jemná hrubost je oddělena neutrálním. prostorem pro snadné zavedení skrz oblast bodu kontaktu, aniž by došlo k jeho narušení.
- K dostání v šířkách 2,5 a 4,0 mm.



BALENÍ

POPIS

SeptoFipo Strips: 100 pásků (2,5 mm)

SeptoFipo Strips: 100 pásků (4 mm)

SeptoFipo Strip

dokončování a leštění



DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoDiamond Strip

PÁSKY Z NEREZ OCELI, POTAŽENÉ DIAMANTEM

INDIKACE

SeptoDiamond Strips jsou diamantem potažené pásky z nerez oceli indikované pro dokončování výplňových materiálů a při ortodontické aproximální redukci. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít oba pásky, začít střední hrubostí a skončit jemnou hrubostí.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vynikající dokončování výplní.
- Vysoká účinnost při ortodontické aproximální redukci.
- Vysoká odolnost.
- K dostání v jemné (žlutá) a střední (červená) hrubosti – šířka 2,5 mm.



BALENÍ

POPIS


SeptoDiamond Strips: 12 pásků 2,5 mm (jemné)

SeptoDiamond Strips: 12 pásků 2,5 mm (střední)

SeptoDiamond Strips: 12 pásků 2,5 mm (střední a jemné)

SeptoDiamond Strip

dokončování a leštění

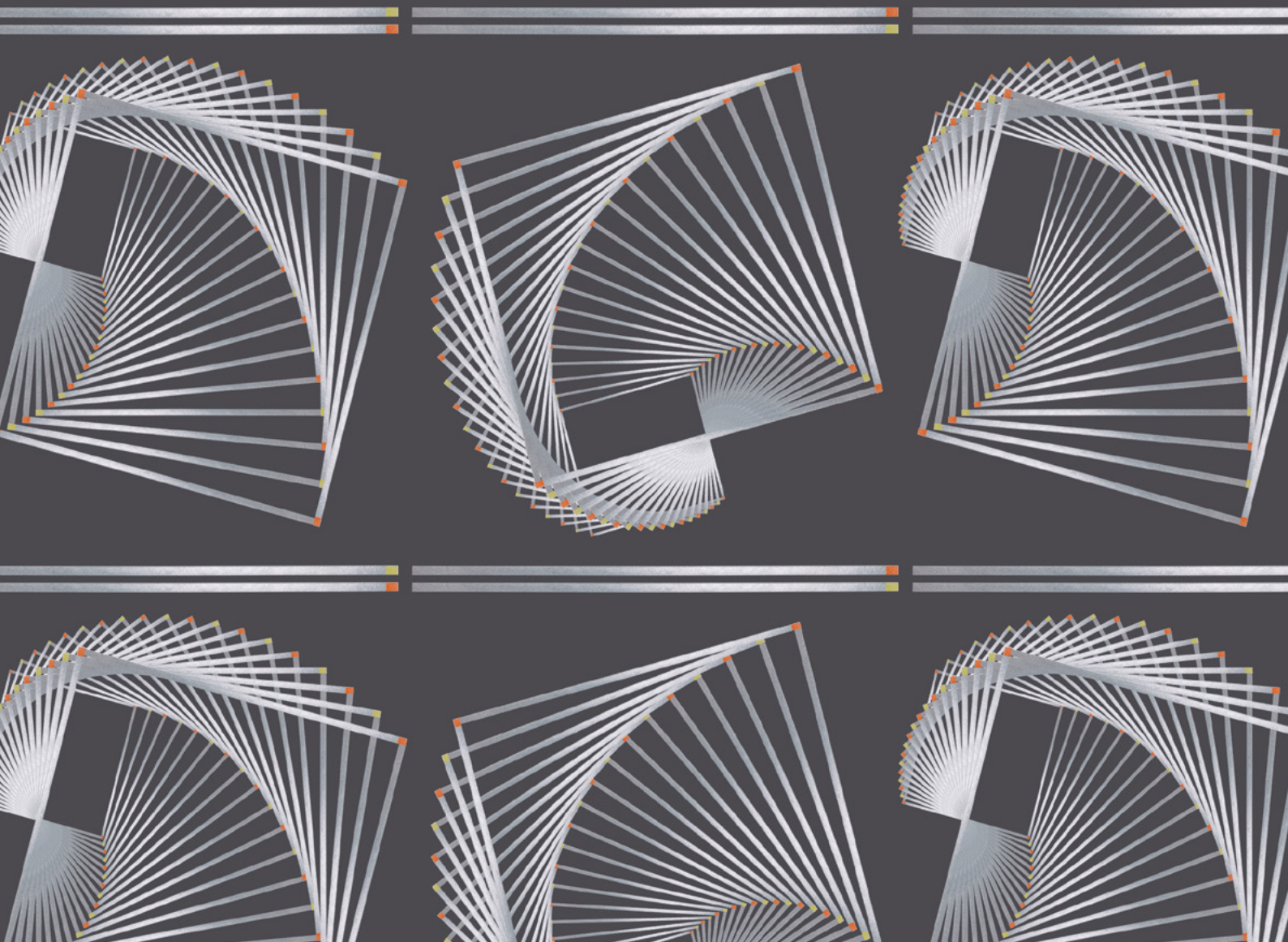

DOKONČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

SeptoDiamond Paste

DIAMANTOVÁ LEŠTÍCÍ PASTA

INDIKACE

SeptoDiamond Paste je diamantová lešticí pasta určená pro konečné leštění a získání nejvyšší kvality estetiky přímých a nepřímých rekonstrukcí. Poskytuje bezkonkurenční lesk skloviny, keramiky, kompozitů, amalgámů a kovových povrchů. Doporučujeme používat s disky SeptoWheels PX.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoký lesk a vynikající přirozený jas na všech výplňových materiálech a sklovině.
- Vhodná do ordinace i do laboratoře.
- Extra-jemná hrubost (1-2 mikrony).
- Snadné odstranění zbytků – pasta je vodou rozpustná.



BALENÍ

POPIS

SeptoDiamond Paste: 2g stříkačka

SeptoDiamond Paste

dokončování a leštění



MATRICE

SeptoMatrix Cervical

TRANSPARENTNÍ MATRICE PRO VÝPLNĚ V. TŘÍDY

INDIKACE

SeptoMatrix Cervical jsou vynikajícím nástrojem, který je nezbytný při předvídatelném modelování přímých kompozitních výplní. Zkušené odborníci jsou při výběru svých nástrojů velmi pragmatičtí a proto si cení příslušenství a nástrojů v pouze nejvyšší kvalitě. Sada matic obsahuje pět flexibilních tvarů v různých velikostech. Poskytují vynikající pracovní pohodlí, zkracují pracovní dobu a zaručují perfektní adaptaci v oblasti gingiválních okrajů.



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Díky různým velikostem matic lze snadno přizpůsobit všem velikostem kavit V. třídy.
- Kompozita jsou polymerována přes průsvitnou matici, tudíž dosáhnete ihned hladšího povrchu, který již není třeba následně tak moc opracovávat a leštit.
- Nijak se nelepí ani nepřichytávají ke kompozitním a skloionomerním materiálům.
- Matrice lze sterilizovat.



BALENÍ

POPIS

SeptoMatrix Cervical: 2 nástroj + 10 ks matic ve velikostech (2x XL, 2x L, 2x M, 2x S a 2x XS)

SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 ks matic ve velikostech (10x XL, 10x L, 10x M, 10x S a 10x XS)

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. XL

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. L

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. M

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. S

SeptoMatrix Cervical Refill: 50 ks matic, vel. XS

SeptoMatrix Cervical

matrice



MATRICE

SeptoMatrix Sectional

ANATOMICKY TVAROVANÉ MATRICE PRO VYPLNĚ II. TŘÍDY

INDIKACE

Sekční matrice SeptoMatrix jsou určeny pro výplně II. třídy. Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů. Kroužky jsou vybaveny trojúhelníkovými silikonovými koncovkami pro dosažení perfektního separace. Zesílení kroužků zaručuje řízení síly při separaci - tvrdý kroužek (modrý) nebo měkký kroužek (růžový). Větší stabilita během rekonstrukce a zvýšená trvanlivost kroužku.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zesílená část je vyrobena z vysoce odolného materiálu.
- Jedinečný design: poskytuje stabilitu, umožňuje bezpečné otevření pomocí kleští.
- Snadné, rychlé a pohodlné umístění pomocí kroužkového systému, který nahrazuje běžné napínače matic.
- Sekční matrice jsou k dispozici ve třech různých velikostech pro lepší přizpůsobení se všem klinickým situacím.
- Kroužky i silikonové koncovky lze sterilizovat.



BALENÍ

POPIS

SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 ks matic ve velikostech (30x L, 40x M, 30x S)
+ 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 14 ks trojúhelníkových silikonových koncovek

SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 ks matic ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S)
+ 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek

SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (tvrdý) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek

SeptoMatrix Sectional Refill: 1 kroužek (měkký) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek

SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 ks matic ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S)

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. L

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. M

SeptoMatrix Sectional Refill: 50 ks matic, vel. S

SeptoMatrix Sectional trojúhelníkové silikonové koncovky: 50 ks



SeptoMatrix Sectional
matrice

KLÍNKY

SeptoWedges

DŘEVĚNÉ ANATOMICKÉ KLÍNKY

INDIKACE

Dosažení klíčových požadavků přímých rekonstrukcí je obnovení správného anatomického tvaru. To je spojeno s nutností použití metod a nástrojů, které činí zákrok efektivnější a předvídatelnější. Kvalitní dřevěné klíny jsou takovýmto prvkem, který je trvale zapsán do pracovního algoritmu zubaře.

Č.	výška	šířka	délka
1	2,2 mm	1,4 mm	12 mm
2	2,2 mm	1,4 mm	13 mm
3	2,2 mm	1,6 mm	14 mm
4	2,2 mm	1,6 mm	15 mm
5	2,5 mm	2,0 mm	16 mm

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Anatomicky tvarované pro lepší přizpůsobení interproximálních prostorů a pro separaci přilehlých zubů.
- K dispozici v 5 velikostech, barevné kódování pro snadné rozeznání.



BALENÍ

POPIS

SeptoWedges Assorted: 100 ks (30x žluté, 20x tyrkysové, 20x červené, 20x fialové, 10x přírodní)

SeptoWedges Refill: 100 ks – žluté

SeptoWedges Refill: 100 ks – tyrkysové

SeptoWedges Refill: 100 ks – červené

SeptoWedges Refill: 100 ks – fialové

SeptoWedges Refill: 100 ks – přírodní

SeptoWedges
klinky



IZOLACE

SeptoTape

LEPENKA NA IZOLACI ZUBŮ

INDIKACE

SeptoTape je lepenka indikovaná pro izolaci zubů při kondicionování kyselinami, nanášení adheziv, kompozitů a při dalších procesech.

Lepenka je vyrobena z inertního a pružného materiálu, takže ji lze obtočit kolem zubu a chrání jej před nežádoucí kontaminací při konzervativních procedurách prováděných na sousedním zubu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Chrání izolované zuby před nežádoucími agresivními účinky.
- Odolná vůči kyselinám, adhezivům a dalším chemickým přípravkům.
- Velmi pružná a tenká, což umožňuje snadné umístění do aproximální oblasti.
- Navržena exkluzivně pro použití ve stomatologii.




BALENÍ

POPIS

SeptoTape: 5 m lepenky na izolaci zubů

SeptoTape
izolace

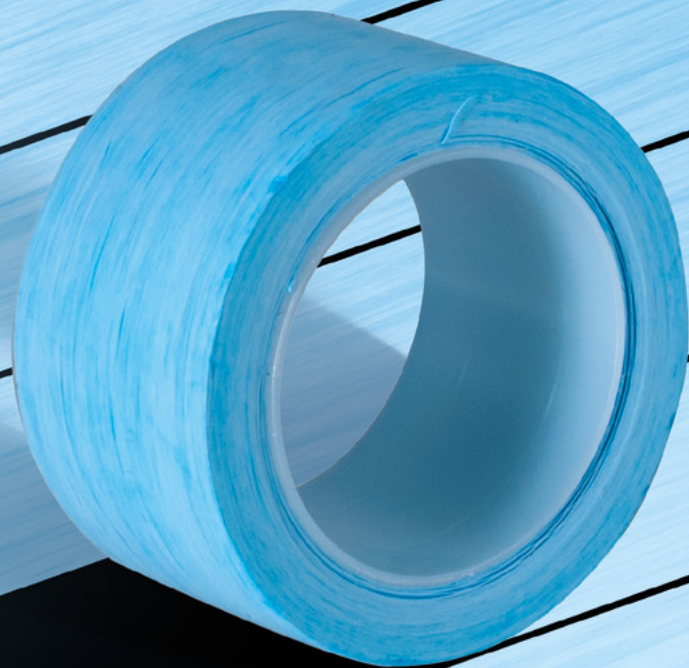

PROFYLAXE

SeptoProphy Strip

NEABRAZIVNÍ PÁSKY Z NEREZOVÉ OCELI NA ODSTRAŇOVÁNÍ APROXIMÁLNÍHO ZUBNÍHO KAMENE


INDIKACE

Pásky SeptoProphy Strips jsou indikovány na odstraňování zubního plaku a kamene.

Jsou nepostradatelnou pomůckou při profylaktických procedurách. Díky kruhovým mikrobřitům umístěným kolem otvorů z jedné strany pásky poskytují účinný a přesný zásah proti zubnímu kameni a současně zachovávají celistvost skloviny a výplňových materiálů.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Snadné, rychlé a bezpečné odstranění zubního kamene bez poškození zubní skloviny.
- Neabrazivní, zachovává sklovinu, výplňové materiály a protetické prvky.
- Kruhové mikrobřity poskytují přesnější a rychlejší odstranění zubního plaku a kamene.
- Snadný přístup do aproximální oblasti díky tloušťce pouhých 0,05 mm.

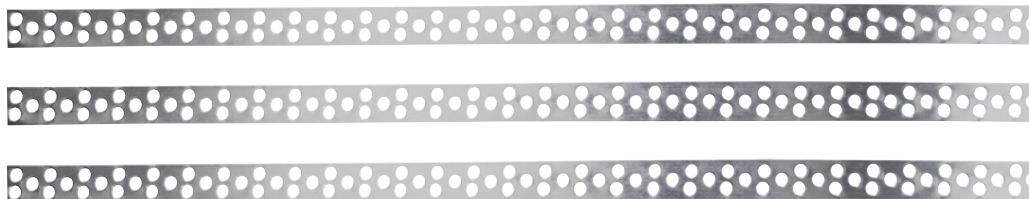

BALENÍ

POPIS

SeptoProphy Strips: 10 pásků



SeptoProphy Strip
profylaxe

www.septoaccessories.cz



Septodont

58 rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés
France

www.septodont.com