

# MATRIX MTA+



Dávkovací blok pro MTA+

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY**  
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

## URČENÍ:

Dávkovací blok Matrix MTA+ slouží k tvarování aplikační dávky připraveného materiálu MTA+ před aplikací do kavity nebo kanálku.


## ZPŮSOB POUŽITÍ:

Připravte materiál MTA+ podle návodu na přípravu přiloženého k přípravku MTA+.

Na každé ze stěn dávkovacího bloku Matrix MTA+ se nacházejí drážky s uvedeným průměrem od 0,7 mm do 1,0 mm. Připravený materiál naneste na stěnu dávkovacího bloku tak, aby vyplnil požadovanou kavitu. Vybraným sterilním nástrojem odeberte vytvarovaný materiál z dávkovacího bloku.



5

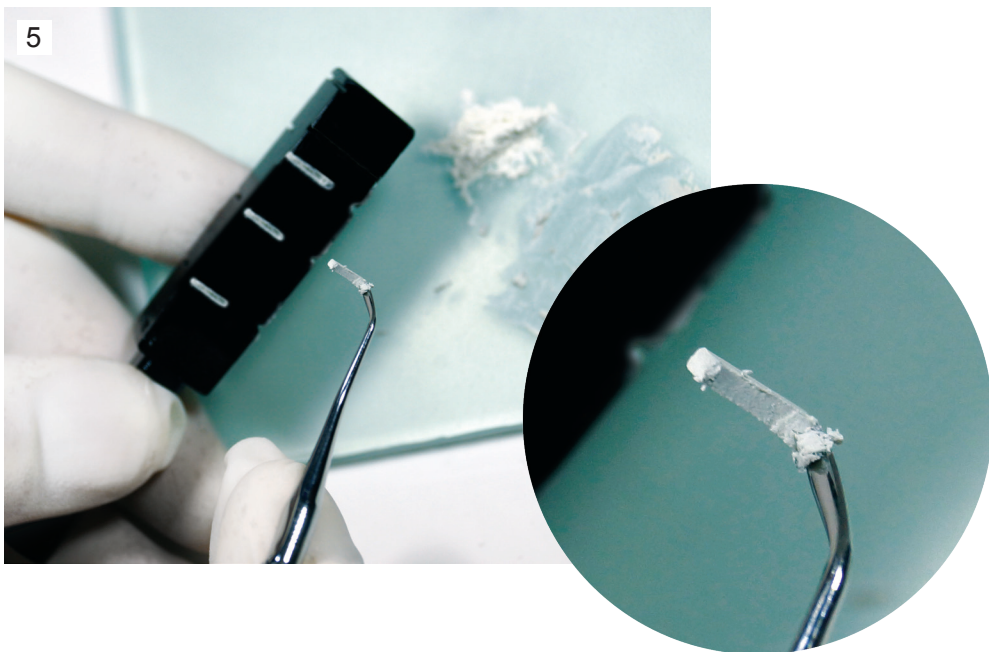

#### KONTRAINDIKACE

Nenechávejte materiál v dávkovacím bloku, připravený materiál musíte spotřebovat do 10 minut od smíchání.

#### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dodržujte instrukce uvedené v návodu k použití přípravku MTA+.

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte mimo dosah dětí.

#### ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM

Před použitím: přetřete isopropylalkoholem nebo ethanolem.

Po použití: odstraňte zbytky materiálu MTA+ kartáčkem a vodou s čisticím přípravkem. Umytý blok MATRIX otřete isopropylalkoholem nebo ethanolem.

Sterilizace při teplotě 121 °C v parním cyklu nemá vliv na fyzikální vlastnosti výrobku (tvar, rozměry).



ČTĚTE V NÁVODU K POUŽITÍ



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 00 48 15 842 35 85