

# Umenie dofarbovania keramiky



*initial*<sup>TM</sup>

Riešenia pre  
dofarbenie

Lustre Pastes NF  
Spectrum Stains

**GC**




# Zvládnite všetky svoje estetické úlohy s Initial™ od GC

Spoločnosť GC ponúka používateľom produktov Initial najmodernejšie a vysoko estetické riešenia pre dofarbovanie keramiky. V závislosti od prípadu a od požadovaných vlastností Vám dva produktové rady Initial Lustre Pastes NF a Initial Spectrum Stains poskytnú očakávané výsledky. Sú vhodné pre široký rozsah koeficientu tepelnej rozťažnosti (CTE), vďaka čomu môžete pracovať s kompletnou škálou keramiky GC Initial a s takmer všetkými ostatnými druhmi keramiky.


**Initial Lustre Pastes NF**, jedinečná 3D dofarbovacia glazúrovacia keramika od GC, prináša hĺbku a autenticitu všetkým Vaším dokonalým náhradám ... a to len nanosením farbičky. Už nepotrebujete zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonateľnú živosť a prirodzený lesk pre všetky Vaše náhrady.

**Initial Spectrum Stains** ponúkajú 2D dofarbovací efekt a je možné ich použiť pre vnútorné ako aj pre vonkajšie dofarbenie keramiky. Zabezpečia veľmi prepracovaný konečný výsledok s lesklým povrchom a zachovaním textúry.

Oba tieto produkty sa navzájom dopĺňajú... V niektorých prípadoch sa môžu použiť obidva; napríklad, Spectrum Stains sa môžu pridať do Lustre Pastes NF alebo do keramických práškov na vrstvenie keramickej náhrady.

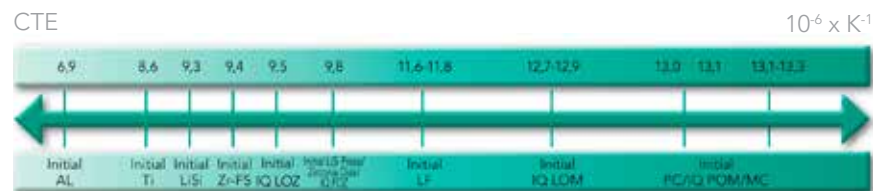

Kompatibilita s keramickou líniou Initial

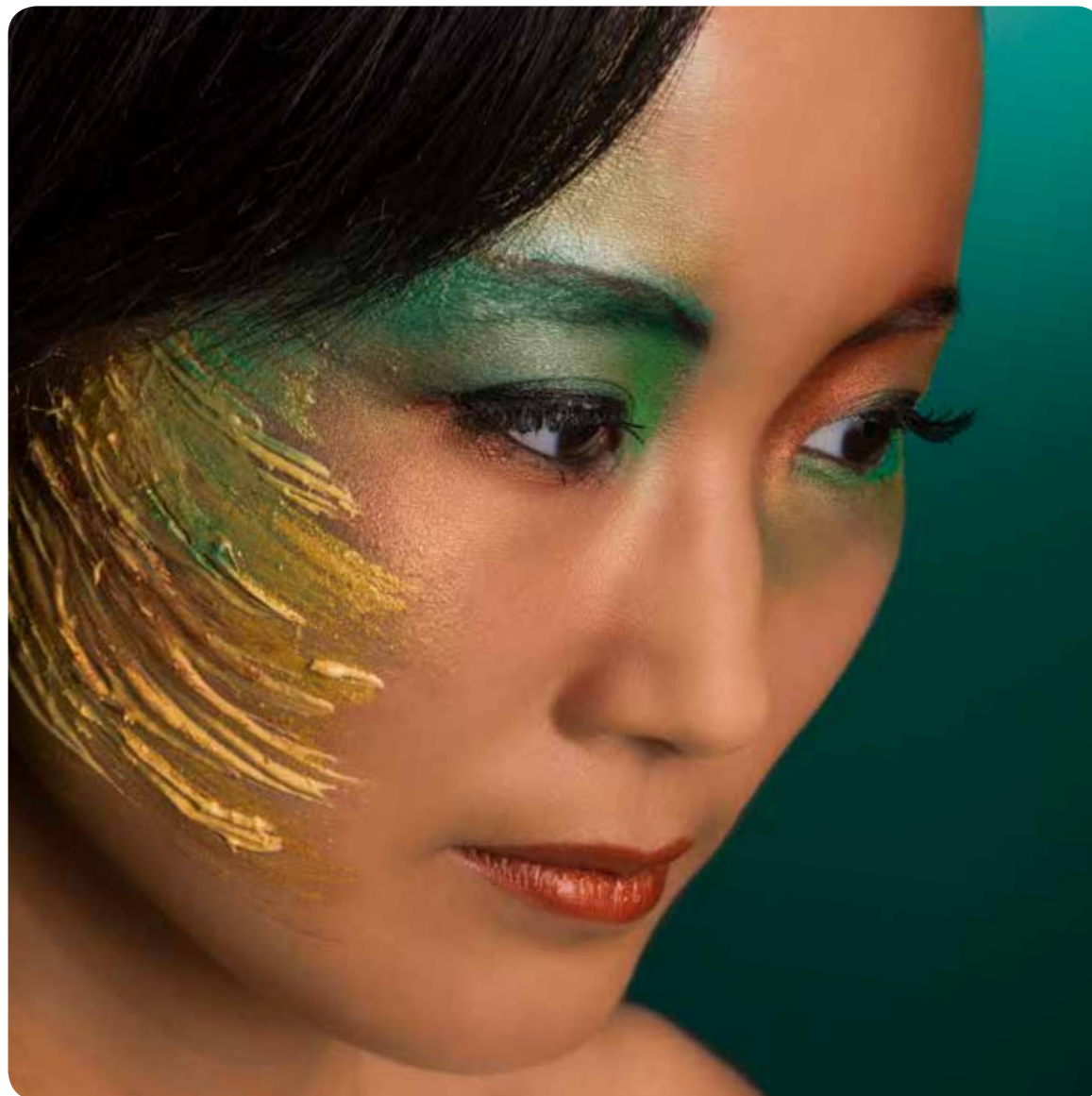


## Lustre Pastes NF V-Shades

S odtieňmi "Body A-D" dosiahnete veľmi ľahko a rýchlo požadovaný odtieň podľa VITA kľúča. S ďalšími dostupnými odtieňmi môžete náhrady ďalej charakterizovať pre dokonale prispôbený konečný výsledok.



## Lustre Pastes NF Gum Shades

Gum Shades sú výsledkom špeciálneho výberu matných, ružovo zafarbených keramických častíc, ktoré dokonale napodobňujú vzhľad prirodzeného ďasna. Je možné jednoducho dosiahnuť celkom prirodzený prechod medzi okrajom korunky a gingívou.

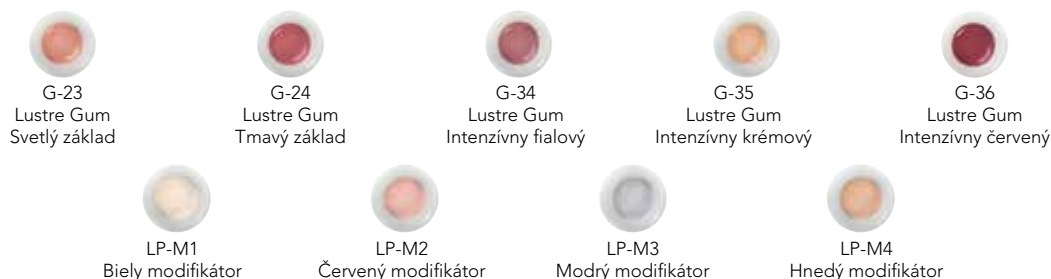

## Spectrum Stains

Farbičky a glazúry sú vytvorené pre vonkajšie dofarbovanie a glazovanie keramických materiálov vo farbe zuba a pre vnútornú individualizáciu vrstvenej keramiky. Initial Spectrum Stains sú kompatibilné so širokým rozsahom koeficientu CTE a sú dokonale prispôbené tak, aby sa hodili takmer pre všetky druhy keramiky. Predovšetkým sú prispôbené k estetickému konceptu farieb portfólia keramiky Initial.

Initial Spectrum Stains sú práškové glazúrovacie farbičky, ktoré sú k dispozícii v ponuke 16 odtieňov pre dosiahnutie estetického výsledku Vašich náhrad.

Bez ohľadu na spôsob aplikácie sa dosiahne veľmi decentný konečný výsledok so zachovaním povrchovej textúry a zaistením optimálnej úrovne lesku.



# Estetická krása vďaka Initial Lustre Pastes NF

## Dokonalá konečná úprava Vašich náhrad

Už viac nepotrebuje zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonateľnú živosť a prirodzený lesk pre všetky Vaše náhrady. S Initial Lustre Pastes NF môžete získať hĺbku farby a prirodzenú translucenciu ... a to len nanosením farbičky.

Initial Lustre Pastes NF sú založené na špeciálnej zmesi jemných keramických častíc. Postupy pre dokončenie Vašej práce zostávajú rovnaké bez ohľadu na techniku použitú pri vrstvení. Použitím riediacej tekutiny sa do konca zachová optimálna konzistencia.

Požadovaný odtieň podľa VITA kľúča sa vytvorí nanosením pasty Lustre Pastes NF v rozmedzí "Body A-D". Tento postup zahŕňa všetko potrebné pre rýchle vytvorenie odtieňa podľa VITA kľúča. K dosiahnutiu vysoko estetických výsledkov pre zdokonalenú charakterizáciu jednoducho použite ďalšie dostupné odtiene.



Báza



Aplikácia LP Neutral



Aplikácia odtieňov Body Shades



Finálna náhrada  
vrátane farby a lesku

## Jednoduché modifikácie

S pastami Initial Lustre Pastes NF môžete jednoducho zmeniť bežnú keramickú korunku a mostík. Zmeniť farbu, jas a svetlosť alebo pridať dodatočný povrchový lesk nikdy nebolo tak jednoduché!



Jas



Farba



Intenzita šedej

„Dofarbovanie  
keramiky umožňuje  
konkrétne  
vyjadrenie tých  
najnenápadnejších  
emócií“.



# Pridajte charakter svojim „one body“ náhradám ...

Jedinečná konzistencia umožňuje homogénne modifikácie a vzhľad. Požadovanú povrchovú textúru/hladkosť vrstvy Lustre Pastes NF je možné dosiahnuť jemným vibrovaním alebo kondenzovaním náhrady. Nie je potrebné žiadne zložité vrstvenie alebo ďalšie vypaľovacie cykly. Je to rýchle, jednoduché a bezpečné. Pasty sú pripravené na použitie s jemnými tixotropnými vlastnosťami pre jednoduchú a presnú aplikáciu.



Plne anatomické konštrukcie z lítium disilikátu ako napr. LiSi Press je možné individualizovať s Lustre Pastes NF.



Hľadáte spôsob, ako dodať ďalšiu živosť Vaším monolitickým prácam na báze zirkónu vytvoreným pomocou CAD/CAM, ako napr. s diskom Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF sú riešením v každom prípade.



So systémami GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal alebo Press-over-Zircon je možné dodať charakteristiku a lesk len v jednom vypaľovacom cykle.

... alebo ich upravte po vrstvách pre dosiahnutie efektov hĺbky.



Cut back technika



Použitie Lustré Pastes NF (+ vypaľovanie)



Použitie opáľovej/Inicizálnej hmoty (+ vypaľovanie)



Konečný výsledok

Použitím pást Initial Lustré Pastes NF pri technike cut-back docielite pri svojich lisovaných alebo vrstvených prácach tie najlepšie estetické výsledky. Po dofarbení pastami Lustré Pastes NF sa dokončenie realizuje pomocou špeciálnej fazetovacej keramiky GC Initial: CL-F pre vysokú translucenciu a pomocou opáľových a sklovinových hmôt pre incizálne efekty.



# Domaľujte červenú a bielu estetiku ...

Dva systémy, jeden prístup.



Východisková situácia



Použitie rôznych odtieňov ďasien Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



Charakterizácia pomocou odtieňov podľa VITA kľúča



Konečný výsledok





... s prirodzenými prechodmi, dokonca aj na zirkónovej konštrukcii.



Z dôvodu zvyšujúcej sa popularity zirkónových náhrad a náhrad vytvorených pomocou CAD/CAM spoločnosť GC ponúka riešenia pre zachovanie rovnakých estetických štandardov. Vaša práca bude vyzerat prirodzene a pekne vďaka Initial Lustre Paste NF. Jedinečné zloženie tohto produktu ponúka lepšie prispôsobenie základnému keramickému materiálu a opticky pôsobí ako vrstvená keramika, čím sa zvyšuje 3D efekt Vašej náhrady. V jednoduchosti je krása!



# Rozšírte svoje možnosti dofarbenia s Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains obsahujú pigmenty, ktoré sú sintrované vo vnútri živcovej matrice pre stabilitu a pre umožnenie konzistentných reprodukovateľných výsledkov. Môžete sa pohrať s farbami a získať neobmedzené farebné možnosti vďaka Initial Spectrum Stains. Použite ich pre vnútorné ako aj vonkajšie dofarbenie. Môžu sa tiež pridať do keramickej hmoty alebo do pást Initial Lustre Pastes NF pre získanie ďalších možností dofarbenia!

## Dve konzistencie so zachovaním textúry


Initial Spectrum Stains je možné aplikovať v preferovanej konzistencii používateľa, ako pastu alebo tekutejšiu hmotu. Bez ohľadu na použitú konzistenciu bude konečný výsledok rovnaký: veľmi decentné zafarbenie a lesk so zachovaním povrchovej textúry náhrady; sú 2D variantom pást Initial Lustre Pastes NF.



Korunka s jemnou textúrou pripravená na glazovanie



Glazovanie s tekutou alebo pastovou konzistenciou

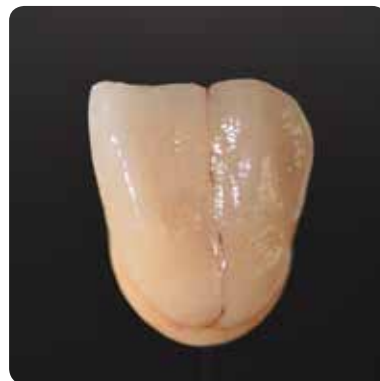

Po vypaľovaní: dofarbené a glazované so zachovaním jemnej textúry



Vnútorné dofarbenie ...



... alebo vonkajšie



# 2D a 3D riešenia pre dofarbovanie keramiky... od spoločnosti GC

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades

- 4 odtiene Body Shades a 1 neutrálny odtieň pre získanie náhrady v odtieňoch VITA tou najjednoduchšou cestou
- 9 odtieňov Effect Shades pre uplatnenie Vašich umeleckých schopností a vytvorenie bielych škvŕn, dekalifikácie, vlasových čiar a prasklín

### Zloženie setu:

1x Neutral (4 g)  
1x Value (4 g)  
4x Body Shades (4x 4 g)  
8x Enamel Effect Shades (8x 4 g)  
1x riediacia tekutina (8 ml)  
1x obnovovacia tekutina (8 ml)  
1 miešacia podložka  
2 štetce, Vzorkovník  
Technický manuál



Lustre Enamel Effect 9 (Hlboko oranžový) a 10 (Twilight) nie sú súčasťou setu, ale je možné objednať ich samostatne.

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 pripravených pást v odtieni ďasien s ideálnymi tixotropnými vlastnosťami pre jednoduchú a presnú aplikáciu
- 4 miešateľné Gum Modifiers umožňujúce nekonečnú kreativitu ku kopírovaniu prirodzeného gingiválneho prechodu

### Zloženie setu:

5x Gum Shades (5x 4 g)  
4x Stain Modifier pre LP NF (4x 3 g)  
Riediacia tekutina (8 ml)  
Obnovovacia tekutina (8 ml)  
1 miešacia podložka  
2 štetce, Vzorkovník  
Technický manuál



## GC Initial Spectrum Stains

- 16 odtieňov v prášku umožňujúcich estetické doladenie
- dve konzistencie s decentným konečným výsledkom, so zachovaním textúry a získaním optimálnej úrovne lesku

### Zloženie setu:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16x 3 g)  
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)  
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)  
Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 g)  
Príručka pre Initial Spectrum Stain odtiene



**GC EUROPE N.V.**

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**

GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**