




# Presvedčte sa na vlastné oči!



Jedinečný gélový  
indikátor plaku v troch  
farebných odtieňoch  
na rozoznanie nového,  
zrelého a kyselinotvorného  
biofilmu.

**Tri Plaque ID Gel**  
od **GC.**

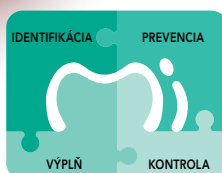

Časť programu  
Minimálnej intervencie od GC.

# GC



# L'udia často potrebujú vidieť, aby uverili

GC Tri Plaque ID Gel nielen dokáže v niekoľkých jednoduchých krokoch **rozlíšiť starý plak od nového**, ale tento jedinečný gél takisto dokáže **presne označiť miesta najväčšieho pôsobenia baktérií**, a to odhalením kyslého pH. Táto dodatočná informácia vám veľmi pomôže vo vašej každodennej praxi, motivovať pacientov k zlepšeniu ich ústnej hygieny.


Tri Plaque ID Gel = Modrý pigment Červený pigment Sacharóza

Kyselina Baktérie




## NOVÝ PLAK

Keď je biofilm plaku riedky, modrý pigment sa ľahko zmyje a zostane červený pigment, ktorý sa prejaví červenou/ružovou výslednou farbou.

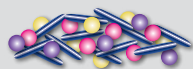


## STARÝ PLAK (> 48 h)

Zrelý biofilm plaku má hustú štruktúru, takže oba pigmenty - modrý aj červený - sa zmiešajú a vytvoria modrú/fialovú vrstvu.

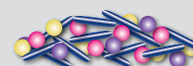

## MIMORIADNE RIZIKOVÝ PLAK

Sacharóza v GC Tri Plaque ID Gèle sa pôsobením kyselinotvorných baktérií vo vysoko rizikovom biofilme plaku premení na kyselinu. Tá znižuje pH plaku (<pH 4,5), vďaka čomu červený pigment zmizne a zostane svetlo modrá farba.

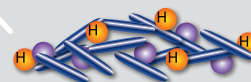

## MIMORIADNE RIZIKOVÝ PLAK

Dr. G. Ghani, Veľká Británia

## Tri odtiene - tri jednoduché kroky k zaisteniu pacientovej spolupráce

**1** Pomocou tampónu, mikroštetčeka alebo vatovej pelety naneste gél

**2** Dané miesto jemne opláchnite vodným sprejom a odsajte odsávačkou. Objaví sa plak v troch odtieňoch:

- modrý/fialový - starý plak (viac ako 48 hodín)
- červený/ružový - čerstvo vytvorený plak
- svetlo modrý - vysoko rizikový plak

## Balenie

004273 40 g Tuba (36 ml) gélového indikátora

**3** Po stanovení diagnózy jednoducho odstráňte kefkou



V rámci preventívnej stomatológie potrebujete mať vy aj vaši pacienti čo najviac pomôcok na dosiahnutie optimálneho ústneho zdravia. GC Tri Plaque ID Gel sa môže stať neoceniteľnou súčasťou vašej každodennej diagnostickej praxe.

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Czech R. & Slovakia  
V Olšinách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
slovakia@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

# GC