

Speedex light body . surface activated

DE

Gebrauchsinformation
Universal Aktivators kann die Aushärtzeit bei einflusst werden.

Definition

Speedex light body ist eine Dentalabformmasse auf Silikatbasis.

Materialtyp

Polysiloxane, kondensationssvernetztes Silikon Elastomer, Niedrige Viskosität, ISO 4823, Type 3, low consistency Basis; dunkelgrün

Zubehör: Speedex Universal Activator (separat); grün

Anwendungsgebiete

- Korrekturmasse in der Konkavabformtechnik - Spritzmasse in den Zahnabformtechniken - Unterfettungsaufnahmemasse

Sicherheitshinweise

(Waren-)Name: Speedex light body Auch bei minimaler Aushärtzeit steht eine ausreichende Verarbeitungszeit zur Verfügung.

Auch die Komponente mit dem Spatel aufnehmen und gleichmäßig auf der anderen Komponente austrennen.

Technische Daten nach ISO 4823

Die Messungen wurden bei 23 °C / 73 °F durch Speedex Universal Activator gezeigt.

- Ausgangszustand: Bei Kontakt mit den Augen: Wasser spülen und Auge ausspülen.

- Hautkontakt: vermeiden. Immer mit Schutzhandschuhen arbeiten.

- Nicht verschlucken: verhindern.

- Atmung: kein, umfangreich einatmen.

In Kontakt gelangt, können kontaminiert sein.

Desinfektionshinweise beschränkt.

Abgabe nach Zahnlärche und Zahntechnische Labors oder deren Auftrag.

Hinweis

Bitte die Gebrauchsanweisung von Speedex Universal Activator beachten.

Gegenanzeigen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bedenken.

Neben- und Wechselwirkungen

Polysiloxane weisen eine starke biologische Verträglichkeit auf. Bei fast jedem sind schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt. Abdruckstoffe können ebenfalls bestimmt sein.

Den Anwendungsbereich auf die Mundhöhle und nach der Entfernung wird mit einem Spatel abgewischt.

Durchnässung

Das Abformen erfolgt nach der Entnahme aus dem Spatel und anschließend mit einem Spatel abgewischt.

Den Anwendungsbereich auf die Mundhöhle und nach der Entfernung wird mit einem Spatel abgewischt.

Löffel

Kontaminations- oder individuelle Löffel. Für die einzelne Abformung empfehlen wir alle Löffel mit einer dünnen Schicht COLTENE Aushärtzeit zu bestreuen.

Dosierung

Zwei gummihölzerne Strähne auf den Mischblock aufdrücken. Zuerst den Speedex Universal Activator dosieren. Danach die Basismasse Speedex light body auftragen. Tube nach Geschmack sofort schließen.

Über- und Unterdosierung möglich:

Durch Über- und Unterdosierung des Speedex

Universal Aktivators kann die Aushärtzeit bei einflusst werden.

Aufbereitung

Ausgebautes Material kann mit einem stumpfen Instrument entfernt werden. Durchlegen in handelsübliche Universal-Lösungsmittel oder Leichtreiniger löst sich das COLTENE Adhesive aus. Lösungsmittel sollen nur in gut belüftete Räumen verwendet werden. Löffel wie üblich reinigen und desinfizieren / sterilisieren.

Klinische Arbeitszeiten

Normaldosierung

s1:30 min

s3:00 min

s1:00 min

s3:00 min

s1:30 min

s3:00 min

Speedex light body . surface activated

Czy masz jakieś pytania? Wysyłaj e-mail do naszego biura: info@coltene.com
Czy masz jakieś pytania? Wysyłaj e-mail do naszego biura: info@coltene.com

Proporcje mleczania baza/kat.: 5 ml / 1 ml 5 g / 0,88 g

Data sporządzenia instrukcji użycia 09/2018

Naujonoj instrukcijos LT

Dokumenty i maseczki-kiełki

Aplikatorami

Medyczne tipek

Speedex light body® silikonem atspaudu medžiaga, skruo naudotu odontologiniu gipsu

Klinikinės laikas prasakus kiekis

Galiomis laikas ir laikymas

20% padintinas universalaus aktyvatoriaus kiekis

Techniniai duomenys pagal ISO 4823

Saugos instrukcijos LV

Wykonanie modelu

Wykonanie modelu

Gejonių leidykla

</