


Riešenia na retrakciu gingivy pred odtlačaním

3M™ ESPE™


Adstringentná retrakčná pasta

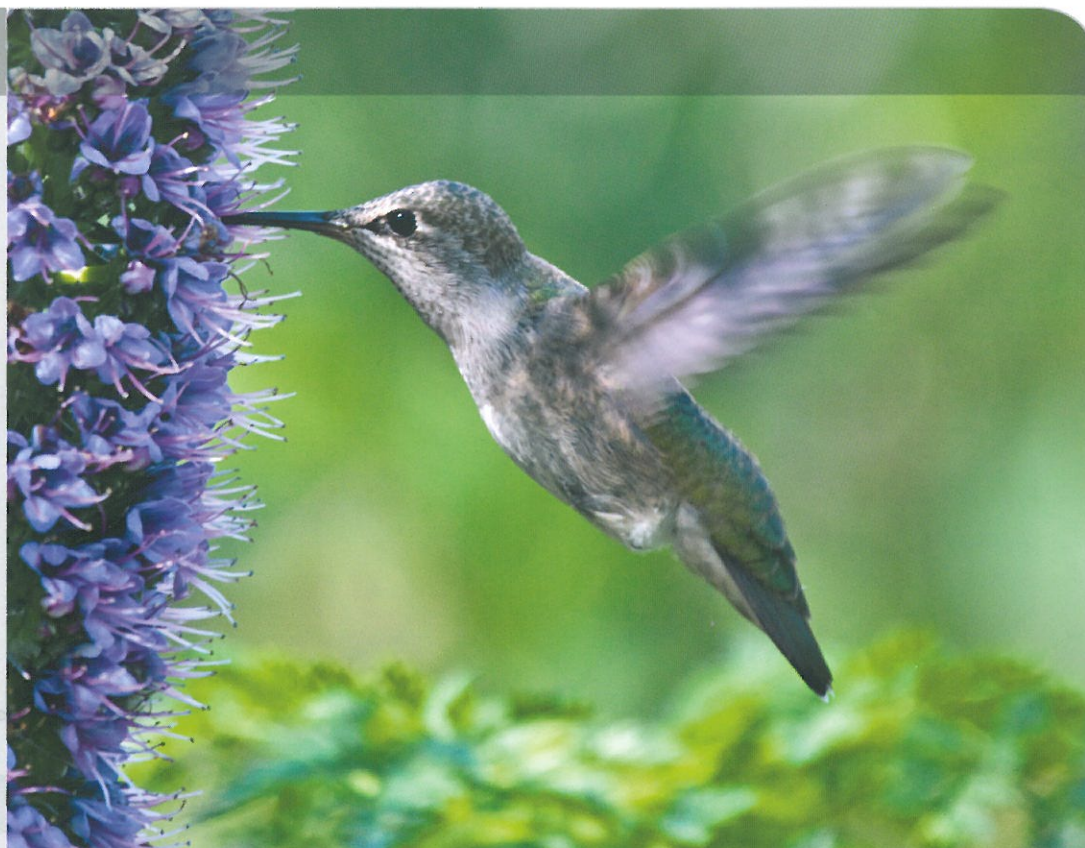

Rýchle a jednoduché  
riešenie retrakcie gingivy


**NOVÉ!**

Vhodná pre polyéterové aj  
A-silikónové odtlačkové hmoty

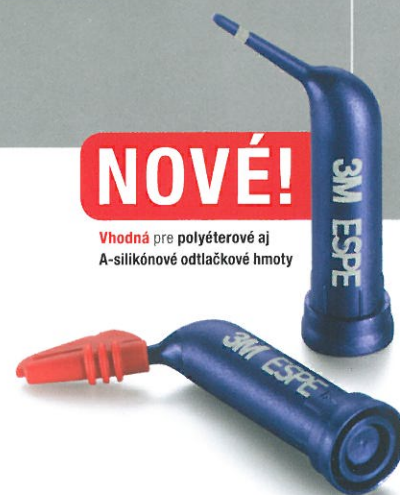

**3M** ESPE

# Jednoduchá retrakcia vďaka novej retrakčnej kapsli

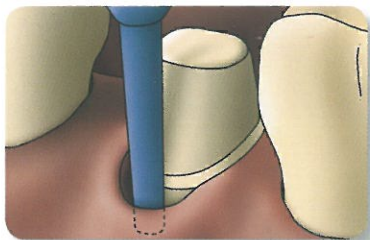

Viac ako 45 rokov sa firma 3M™ ESPE™ zaoberá oblasťou dentálneho odtlačania. Či už vďaka vynálezu polyéterovej odtlačkovej hmoty Impregum™ alebo nedávnomu digitálnemu konceptu "3D v pohybe", moderné stomatologické odtlačanie si ťažko predstaviť bez prítomnosti 3M™ ESPE™. Nová retrakčná pasta zavádza ďalší míľnik: predstavuje jednoduchý a rýchly spôsob dosiahnutia gingiválnej retrakcie. Vďaka jemnej špičke kapsle je možné retrakčnú pastu pohodlne aplikovať na miesto určenia - hlboko do sulku, ktorý otvorí a vysuší už behom 2 minút.

## Indikácie

3M ESPE Adstringentná retrakčná pasta je indikovaná na dočasnú retrakciu marginálnej gingivy, dosiahnutie otvoreného a suchého sulku, (pri zdravom parodontu), pri dentálnych zákrokoch ako sú:

- Protetické odtlačanie (hmotami alebo digitálne)
- Preparácia dočasných odliatkov
- Preparácia kavít triedy II a V

Tento výrobok sa nesmie používať pri pacientoch trpiacich chorobami parodontu, otvorenými furkáciami, obnaženou kosťou.



## Vlastnosti a výhody výrobku:

### Všeobecné výhody:

- Umožňuje dosiahnutie čistého, suchého sulku a dlhodobej hemostázy
- Účinne otvára sulkus
- Aplikácia na 1 až 3 zuby použitím jednej kapsle



### Výhody oproti vláknam:

- Lahký a časovo úsporný postup: až o 50 % rýchlejší
- Nižšie riziko krvácania po odstránení
- Šetrný účinok na tkanivo, komfortný pre pacienta



*In-vivo aplikácia adstringentnej retrakčnej pasty*

### Výhody oproti iným pastám:

- Lahšia aplikácia do sulku a lepší aproximálny prístup vďaka jemnej špičke kapsle
- Hygienická jednorázová forma, predchádza problémom s krížovou kontamináciou
- Aplikovateľná väčšinou dávkovacích pištoľí na kompozity

*“ Na novom výrobku od 3M ESPE na retrakciu gingivy mi najviac vyhovuje jednoduchosť použitia, priame jednorázové dávkovanie a predovšetkým jeho účinnosť.”*

Dr. Nicola, Taliansko



**Lahké zavedenie do sulku a jeho následné otvorenie**



Špička kompule má zaoblený okraj

Predĺžená, štíhla koncovka má orientačný pásik


Orientačný pásik zodpovedá veľkosťou a tvarom špičke paro sondy. Slúži na presnú navigáciu prieniku koncovky v sulku.

**Jednoduché vytlačenie vysoko vizkózneho pasty**



Optimalizovaný tvar špičky: lepšie vytlačenie pasty

**Hygienická a čistá jednorázová kompula**

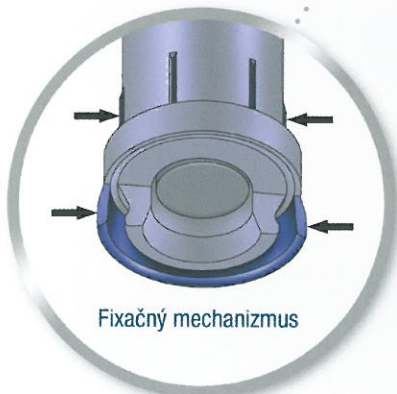

Fixačný mechanizmus

**Bezpečná a stabilná aplikácia z bežne používaných pištoľových aplikátorov**

*“ Jednoduchý a účinný spôsob dosiahnutia gingiválnej retrakcie pred odtlačaním alebo priamou rekonštrukciou. Lepší než retrakčné výrobky, ktoré som používal v minulosti.”*

Dr. Anderson, Veľká Británia

# Adstringentná retrakčná pasta


Pracovný postup - krok za krokom - na dosiahnutie otvoreného, suchého sulku

1




Vyberte z balenia kapslu a založte ju do dávkovacej pištole (vyhovuje väčšina pištolí na kompozity). Vytlačte na podložku malé množstvo pasty, ktoré znehodnoťte.

2

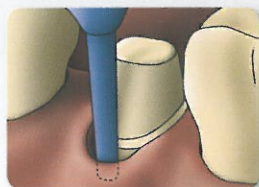


Špičku retrakčnej kapsle zaveďte do sulku preparovaného zuba. Mäkké tkanivo je mechanicky odtlačené.

3

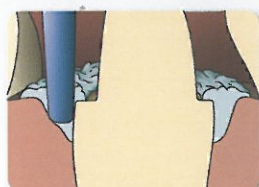

Pomaly a kontinuálne vytlačajte retrakčnú pastu po obvode sulku, pokiaľ ho úplne nenaplníte.


4

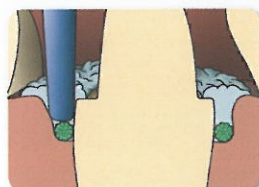

#### **VOLITELNÝ POSTUP: POUŽITIE S VLÁKNOM**


Na výraznejšie odklonenie gingivy od zuba je možné použiť retrakčnú pastu aj s konvenčným retrakčným vláknom.

5

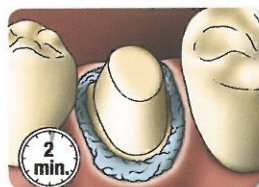

Adstringentnú retrakčnú pastu ponechajte v sulku pôsobiť minimálne 2 minúty.

6

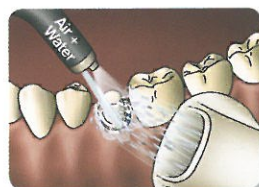

Nakoniec pastu úplne odstráňte zo sulku pomocou prúdu stlačeného vzduchu a vody. Po vysušení môžete odtláčať dokonale pripravený sulkus.



## Objednávacie informácie

| Obj. č. | Obsah balenia  |
|---------|--|
| 56944   | <b>3M™ ESPE™ Adstringentná retrakčná pasta</b><br>Doplnujúce balenie – 25 kapslí |
| 56945   | <b>3M™ ESPE™ Adstringentná retrakčná pasta</b><br>Klinické balenie – 100 kapslí  |

**3M ESPE**

3M Slovensko s. r. o.

Vajnorská 142, 831 04 Bratislava  
Tel. 02 / 49 105 211  
Fax: 02 / 44 454 476  
Email: innovation.sk@mmm.com  
www.3m.sk



3M, ESPE, Impregum a Lava sú obchodnými značkami 3M alebo 3M Deutschland GmbH. 3M 2013. Všetky práva vyhradené.

Prosím recyklujte. Vytlačené na Slovensku.