

### Návod na použitie

#### **Popis:**

Plnička striekačiek s ohrevom od Vista Dental je jednoduché a pohodlné zariadenie na plnenie striekačiek tekutým roztokom. Obsahuje ventil, ktorý sa vložением striekačky automaticky uvoľní, na rýchle plnenie bez zbytočných strát a taktiež aj objemový senzor ktorý sa rozsvieti keď je nádoba prázdna.



#### **Príprava plničky striekačiek na používanie:**

Nájdite vrečko s farebnými krúžkami. Vyberte si farbu krúžku, ktorú chcete používať na jednoduchšie zistenie roztoku v Plničke striekačiek. Jednoducho zacvaknite farebný krúžok okolo ventilu pre striekačku.

#### **Príprava nádoby s roztokom na použitie:**

**Poznámka:** Prázdna fľaša je IBA na roztoky, ktoré nie sú vyrobené Vistou Dental. Ak používate Vista Dental Roztoky, prosím odhodte prázdnu nádobu alebo ju odložte na ďalšie použitie.

1. Odstráňte čierny vrchnák z bieleho základu.

**Poznámka:** Ponechajte červenú vyťahovaciu zátku, v strede bielej základne, zatiaľ na mieste.

2. Nájdite vrečko s plastovými zátkami a vyberte z obalu. Vložte zátku na vnútornú (závitovú) stranu čierneho vrchnáka. Zatlačte dovnútra až kým sedí pevne.
3. Vyberte fľašu s roztokom a odstráňte originálny vrchnák z vybranej fľaše. Nahradte ho čiernym vrchnákom Plničky striekačiek a silno zatvorte.

(Ďalšie prázdne fľaše/alebo plastové vrchnáky je možné zakúpiť aj osobitne.)

#### **Aktivujte svetelný senzor obsahu:**

1. Aby ste aktivovali svetelný senzor, odstráňte červenú vyťahovaciu zátku z bielej základne.
2. Červený indikátor by mal byť podsvietený pokiaľ je základňa postavená rovno.

## **Inštalácia fliaš s roztokom do Plničky striekačiek s ohrevom:**

1. Otočte fľašu s roztokom tak, aby bol čierny vrchnák na spodku. Dobre zatlačte a otočte v základni Plničky striekačiek až kým je vrchnák kompletne zašróbovaný. Toto uvoľní plastovú zábezpeku a umožní roztoku tiecť do plničky. Červené svetielko senzora by sa malo vypnúť. (V prípade že máte problém zašróbovať fľašu do základne, jednoducho naneste maličké množstvo silikónového gélu na o-ring/tesnenie na vrchnáku.)

1. Dajte ochranný kryt fliaš späť na základňu Plničky striekačiek.
2. Položte Plničku striekačiek na požadované miesto.

**Poznámka: Plnička striekačiek s ohrevom má vnútorný ohrievač, ktorý dokáže zahriať teplotu roztoku až o 50 stupňov viac ako je izbová teplota.**

Vnútorný termostat obmedzuje maximálnu teplotu na 140°F / 60°C (+/- 10°F). Pretože dochádza ku zvýšenému rozkladu roztoku pri vyšších teplotách, tak sa odporúča na konci každého pracovného dňa vypnúť Plničku striekačiek s ohrevom. (Zariadenie tekutinu zahreje v priebehu 45 minút – takže každé ráno je potrebné zariadenie zapnúť v predstihu).

## **Plnenie striekačiek**

1. Vezmite si nejakú striekačku s Luer Lock konektorom a nasadte ju na ventil pre striekačky. Striekačku zatlačte a otočte – až pokiaľ nebude pevne sedieť vo ventile.

**Poznámka: Plničky striekačiek s ohrevom – musíte zo striekačky vytiahnuť všetok vzduch až pokiaľ nezačne naťahovať roztok.**

2. Jednoducho vytiahnite plesť na striekačke a naplňte požadovaným množstvom.
3. Odšróbujte striekačku z ventilu a dajte na ňu vrchnák alebo ihlu – senzor množstva sa rozsvieti keď vo fľaši bude už iba cca 12cc roztoku.
4. Keď sa senzor množstva rozsvieti, odstráňte fľašu zo základne.

**Poznámka: Neodstraňujte fľašu zo základne predtým ako je prázdna, lebo môže dôjsť k rozliatiu roztoku.**

5. Odstráňte čierny vrchnák z prázdnej fľaše a opätovne ho použite – alebo dajte ďalšiu zátku do vrchnáku predtým ako nasadíte novú fľašu s rovnakým roztokom.

## **Technické poznámky:**

**UPOZORNENIE: Nepoužívajte horľavé roztoky (tekutiny) v Plničke striekačiek s ohrevom.**

1. NEPOUŽÍVAJTE roztoky s alkoholom v Plničke striekačiek – pretože takéto roztoky Vám ju poškodia.
2. Iba 16oz./480ml fľaša s roztokom by sa mala používať v Plničke striekačiek s ohrevom.

**DOLEŽITÉ: aby zostal NaOCl aktívny, zariadenie na konci pracovného dňa VYPNITE!**

3. Raz do mesiaca zariadenie vyčistíte destilovanou vodou tak, že ju napustíte do zásobníka. Potom ju nechajte prebehnúť zariadením tak, že budete plniť striekačky až pokiaľ zásobník nebude vyprázdnený. V prípade potreby túto procedúru zopakujte. Pri častom používaní zariadenie prečist'ujte častejšie.

## **Montáž zariadenia na stenu**

**Plnička striekačiek s ohrevom sa dá jednoducho namontovať na stenu. S každým zariadením sú dodávané dve umelohmotné kotvy a dve skrutky.**

### **Pokiaľ je zariadenie iba jedno**

Odstráňte kryt na miesto pre fľašu, napolohujte zariadenie na stenu, a vyznačte si umiestnenie skrutiek – zadnú stranu zariadení môžete použiť ako šablónu. Vyvrtajte cca 5 mm dierky na označených miestach. Vložte dodané kotvy do vyvrtaných dierok, napolohujte zariadenie a priskrutkujte na stenu s dodanými skrutkami.

### **Pre viac zariadení**

Odstráňte kryt z miest pre fľašu z každého zariadenia. Nainštalujte maximálne 2 plničky s ohrevom alebo 4 plničky bez ohrevu vedľa seba. Umiestnite na stene, vyznačte si umiestnenie skrutiek za použitia spojených zariadení ako šablóny a vyvrtajte cca 5 mm dierky na označených miestach. Zložte dodané kotvy do vyvrtaných dierok, napolohujte zariadenia a priskrutkujte každé zariadenie na stenu s dodanými skrutkami.