

Naprogramujte váš přístroj

X•smart[®]plus



pro endodontické nástroje


PROTAPER•NEXT™




PROTAPER•NEXT™ byl vyvinut jako nová generace systému PROTAPER® UNIVERSAL, který představoval po mnoho let zlatý standard v endodoncii. Je to účinné řešení pro endodontisty, kteří hledají univerzální a flexibilní systém, se kterým je možné řešit naprostou většinu zákroků na kořenových kanálcích.

Snadno naprogramujte váš x-smart^{plus}, abyste tak získali přístup k nové generaci zlatého standardu v endodoncii.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko «SYSTEM» (Systém), dokud nepřejdete na «PROGRAM» (Program).
- 2 Stiskněte tlačítko «FILE» (Nástroj) a zvolte číslo nástroje, které si přejete přepsat (od **1** do **8**).

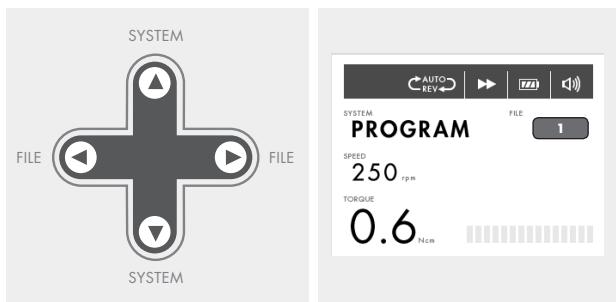

- 3 Stiskněte tlačítka «SPEED» (Rychlost) a «TORQUE» (Torze) a upravte vaše nastavení na doporučené hodnoty rychlosti a torze tak, jak je uvedeno níže :

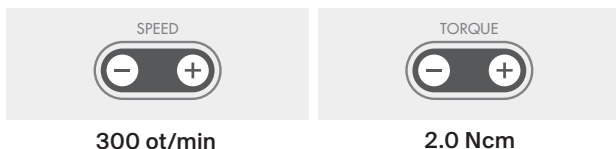

- 4 Stiskněte a podržte tlačítko «MEMO» (Paměť), dokud neuslyšíte nepřerušovaný zvuk.



Vaše nastavení bylo uloženo a vy můžete nyní začít používat systém nástrojů PROTAPER[®]NEXT[™].